

Barres d'appui à ventouses

Restez mobile. Dépassez les limites.

Le système breveté Mobeli de ROTH est une aide pratique, qui a fait ses preuves depuis des années dans le domaine du handicap et pour les seniors. Les barres d'appui à ventouses sont faciles et rapides à installer et tout aussi simples à enlever. Appliquez les 2 ventouses de 120 mm de diamètre sur une surface plane et non-poreuse, abaissez les leviers, terminé.

Toutes les barres d'appui Mobeli sont conçues spécialement pour un usage de barre d'appui. Elles sont très puissantes et sont testées et certifiées par le TÜV. Elles sont disponibles en différentes longueurs. De nombreuses aides comme les supports de douche et le raccourcisseur de baignoire complètent logiquement la gamme Mobeli.

MOBELI®	Longueur de l'appui	Charge maxi	Référence
Fixe	210	75 kg	14002 25 S
Fixe	350	70 kg	14002 26 S
Fixe	650	70 kg	14002 27 S
Télescopique	220-345	65 kg	14002 21 S
Télescopique	340-465	65 kg	14002 22 S
Télescopique	440-565	65 kg	14002 23 S
Télescopique	665-790	60 kg	14002 24 S

MOBELI®

Ventouses

Les ventouses sont réalisées dans un matériau étudié spécialement. Elles s'adaptent aussi à des carreaux présentant de légères aspérités.

Barres d'appui télescopiques

Conçues pour s'adapter à toutes les formes et tailles de carreaux, vous pouvez les installer très exactement où vous voulez, sans être gêné par les joints. Leur diamètre est de 35 mm.

Démontage rapide

Toutes les barres d'appui Mobeli peuvent être démontées facilement grâce aux attaches rapides en inox. Vous pouvez facilement emmener votre barre avec vous.

Indicateurs de sécurité

L'innovation la plus récente des barres d'appui Mobeli est tout à fait révolutionnaire. Il s'agit d'une nouveauté mondiale : le premier système de barre d'appui à ventouses avec une mesure continue de la dépression, donc de la force de la ventouse. Les indicateurs mesurent en permanence la dépression dans les ventouses. Lorsque l'indicateur est caché, la ventouse a le maximum de puissance. Plus l'indicateur remonte et devient visible, plus on voit le rebord rouge et plus la ventouse s'affaiblit. On sait alors qu'il faut enlever la barre et la replacer sur le mur. Le système est aussi adapté aux déficiences visuelles, car on sent très bien l'indicateur au toucher lorsqu'il remonte.

Important : les produits Mobeli sont aussi disponibles sans indicateurs de sécurité. Si vous préférez faire l'économie de ce dispositif, supprimez le « S » de la référence du produit.

Aides à la mobilité

Plus de mobilité. En voyage et chez soi.

Variante pour fortes charges, les barres d'appui à ventouses QuattroPlus peuvent être utilisées à plat, dans un angle ou entre 2 cloisons qui se font face.

Les articulations intégrées multiplient les possibilités des QuattroPlus, et leurs 4 ventouses permettent des charges jusqu'à 125 kg.

Les articulations diagonales (option), permettent d'orienter votre QuattroPlus dans toutes les directions, avec une charge maxi de 80 Kg.



MOBELI®	Longueur de l'appui	Charge maxi	Référence
QuattroPlus	200-325	125 kg	14002 41 S
QuattroPlus	320-445	125 kg	14002 42 S
QuattroPlus	420-545	110 kg	14002 43 S
QuattroPlus	645-770	110 kg	14002 44 S

Les possibilités de toutes les barres d'appui télescopiques deviennent innombrables, lorsqu'on les associe à des cardans ou à des articulations simples. Toutes les angulations deviennent possibles, vous permettant un maximum de flexibilité pour l'installation de votre barre d'appui.

Mobeli est la marque authentique des barres d'appui à ventouses. Notre gamme est en constante évolution. Tous les produits Mobeli sont conçus et fabriqués en Allemagne par la société ROTH, avec les plus hauts standards de fabrication. Ils sont tous testés et certifiés par le TÜV.



MOBELI®	Charge maxi	Référence
Cardans multidirectionnels, la paire	50 kg	14005 55
Articulations simples, la paire identique à la barre		14005 58
Articulations diagonales, pour barres QP	80 kg	14615 57



Pratique et confortable. Le raccourcisseur de baignoire se positionne à volonté. Il évite les risques de noyade et peut aussi être utilisé comme étagère mobile.

La poignée de stabilisation. Elle vous stabilise pour les activités quotidiennes, les repas ou les exercices de rééducation. 2 variantes : horizontale ou vario. Vous pouvez l'installer sur toute surface non-poreuse, comme le bois laqué ou mélaminé, le plastique, le métal, etc.

La poignée horizontale reste à plat, la Vario est réglable à plat, à 45° ou à la verticale, vers la gauche ou vers la droite.



MOBELI®	Largeur de la baignoire (mm)	Référence
Raccourcisseur à 2 ventouses, à partir de 510 mm		14002 81 S
Raccourcisseur à 3 ventouses, de 510 à 700 mm		14002 82 S

	Diamètre de la poignée	Charge maxi	Référence
Poignée horizontale	31 mm	15 kg	14002 95 S
Poignée Vario	31 mm	15 kg	14002 96 S

